

一般医療機器

類 別: 機械器具 5 4 医療用捲綿子
一般的名称: 医科用捲綿子

JMDNコード: 10172000

採取用チューブ

再使用禁止

【警告】

使用方法

- 1) やむを得ず汚染あるいは感染した創傷部位に使用する場合は、患者に合った適切な処置を施すなど十分な配慮をもって使用すること。[症状が悪化する恐れがある]

【禁忌・禁止】

1. 適用対象 (患者)

- 1) 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
[アレルギー発現の恐れがある]

2. 使用方法

- 1) 本製品の使用は1回限りです。再滅菌、再使用はしないこと。
[製品が劣化する恐れがある]

*【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- 2) 包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じさせないこと。
- 3) 製品に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄すること。

2. 使用期限

- 1) 使用期限は包材に記載のとおり。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

松田医科工業株式会社
問い合わせ窓口「お客様相談室」
電話番号: 03-3814-6660

*【形状・構造及び原理等】

1. 本品は身体の一部及び体内で検査のための試料を採取する器具である。本品は単回使用である。

2. 主原料

- 1) チューブ: ポリエチレン
- 2) プラスチックシリンジ外筒: ポリプロピレン
ガスケット: プタジエンゴム
内筒: ポリプロピレン

- 3) EMスタイレット: ステンレス (ニッケル・クロム含有)

3. 作動・動作原理

シリンジの内筒を引くことによりシリンジ内に発生する陰圧を利用して、チューブを介して試料を採取する。

【使用目的又は効果】

本品は身体の一部及び体内で検査のための試料を採取する器具である。本品は単回使用である。

【使用方法】

1. 使用前の準備

- 1) 使用前に必ず製品の状態を確認し、必要に応じて組立て使用すること。

2. 使用中の操作

- 1) シリンジの内筒を引くことによりシリンジ内に発生する陰圧を利用して、チューブを介して試料を採取する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 本品の挿入・抜去はゆっくり行うこと。[無理に挿入・抜去すると粘膜組織を損傷する危険性がある]

- 2) 使用中は、本品の折れ、潰れ等の損傷が無いことを随時確認すること。[本品の機能が正しく発揮することが出来なくなる恐れがある]

- 3) 本品を抜去する際は、吸引を停止した状態で行うこと。[吸引中に抜去すると粘膜組織を引き込み損傷する危険性がある]

- 4) 本品の押し子を押し引きする際には必ず真っ直ぐ動かすこと。
[回転運動を加えるとバイパスチューブが破損する恐れがある。]

2. 重要な基本的注意

- 1) 適切な品種選択を行い、通常の手順に従って使用すること。

3. 不具合・有害事象

本品は使用に際し、以下のような不具合・有害事象が考えられる。

- 1) 異物反応による組織の炎症

4. その他の注意

- 1) 包装が破損したり、汚染した場合は使用しないこと。