

一般医療機器

類別：機械器具 5 8 整形用機械器具
一般的名称：骨手術用器械

JMDNコード：70962001

プレイヤー 20

【警告】

使用方法

- 1) 使用者は外科的手法、テクニックについて熟知していること。
- 2) 適切な品種選択を行い、通常の手順に従って使用すること。
- 3) 使用目的に応じて、製品を選択すること。
- 4) 汚染あるいは感染した創傷部位に使用する場合は、適切な外科的処置を行うこと。

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印等）の二次加工（改造）することは、折損等の原因となるので、絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 手術等に使用する締結器をかしめる器具である。
2. 主原料
本体：ステンレス鋼（鉄、ニッケル、クロム含有）
3. 原理
本製品を使用することにより、目的物を挟む。



【使用目的又は効果】

本製品は、骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械である。手動式で再使用可能である。

【使用方法】

1. 使用前の準備
1) 本品は未滅菌品のため、使用前に必ず洗浄し、乾燥後高圧蒸気滅菌等で滅菌を行った後に使用すること。
推奨滅菌条件：120℃・20分

【使用上の注意】

1. 使用上の注意
1) 使用前に必ず製品の状態を確認すること。
2) 使用目的（手術・処置等の医療行為）、以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
3) 使用後は廃棄すること。

【保管方法及び有効期限】

1. 保管方法
1) 保管にあたっては、清潔な場所に保管するとともに、使用期限を確認すること。
2. 使用の期限
1) 適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は製造日より5年。

【販売業者の氏名又は名称等】

USCI ジャパン株式会社
電話番号：03-6823-1100

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

松田医科工業株式会社
問い合わせ窓口「お客様相談室」
電話番号：03-3814-6660