

一般医療機器

類 別: 機械器具 3 2 医療用吸引器
一般的名称: 再使用可能な汎用吸引チップ

JMDNコード: 38749000



ユフステンレス吸引管

【禁忌・禁止】

本製品を切削、打刻（刻印等）の二次加工（改造）することは、折損等の原因となるので、絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

外観写真

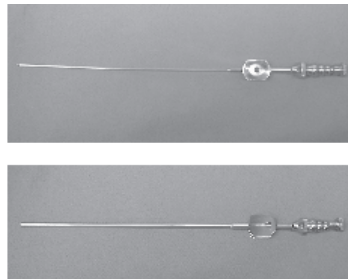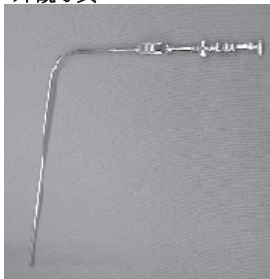

1) 本品は、吸引流量を調整する為に用いる管状の金属製の吸引管である。吸引チューブの先端に接続し、任意に本品の穴を指で塞ぐ事で吸引流量を調整する事が出来る。接続した吸引器の吸引力を用いて、本品管内に対象となる流動物を通して事で吸引器に送り込む構造となっている。

2) 主原料

本体: ステンレス鋼（鉄、ニッケル、クロム含有）

【使用目的又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調整又は指示するのに用いる。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法】

1. 使用前の準備

1) 本品は、未滅菌品のため、使用前に必ず洗浄し、乾燥後高圧蒸気滅菌等で滅菌を行った後に使用すること。

滅菌条件（推奨条件例）: 121℃ ・ 0.1177MPa ・ 20分間

2. 使用中の操作

1) 手術又は治療時に吸引器具に接続する。

2) 必要に応じて、本品の穴部分を指で塞ぐ事で吸引量を調整する。

3. 再使用する場合

1) 再使用する場合には、上記使用前の準備と同様に行うこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

1) 「本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染症ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること」

2) 「本品がプリオン病感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること」

3) 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。

4) 使用目的（手術・処置等の医療行為）、以外の目的で使わないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

5) 一つの吸引回路に複数の吸引管を接続して使用しないこと。（吸引力の低下や吸引停止を引き起こす可能性がある）

6) 吸引を行う際は、徐々に吸引圧を上げる。（急激に上げると組織を引き込み、損傷する恐れがある）

7) 吸引能力が低下した場合は速やかに使用を中止し、詰まりの原因を取り除くこと。

8) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

9) 器具の洗浄には必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤等は使用しないこと。（pHが中性に近いもの（pH6.5～7.5）を使用すること）

10) 漂白剤や消毒液の塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。（ハロゲンイオンを含む溶液はステンレス鋼に対して腐食の原因となる）

11) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。（器具表面に擦過傷が生じ、錆や腐食の原因となる）

12) 洗浄後は直ちに乾燥させ、滅菌処理等を施した後、所定の保管場所に保管すること。

2. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合・有害事象

ヤコブ病患者、その疑いのある患者もしくはヤコブ病起因による異常の可能性のある患者には製品再処理に関連する国内規定を遵守すること。（主要文献及び文献請求先欄参照）

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐため保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。

【保守、点検に係る事項】

1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。

2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。

3) 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクター等）で洗浄するときには、器具同士が接触して器具を損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。

4) 洗剤の残量がないように十分にすすぎをすること。仕上げすすぎは、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。

5) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

6) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、器具の損傷等の異常がないかを点検すること。

7) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌等を行うこと。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるように配慮すること。

8) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献

1) クロイツフェルト・ヤコブ病に関する最新の行政通知

<http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0418-2.html>

2) クロイツフェルト・ヤコブ病診療マニュアル（改訂版）

http://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/pdf/cjd_manual.pdf

3) プリオン病感染症予防ガイドライン2020

prion.umin.jp/guideline/pdf/cjd_2020v6.pdf

2. 文献請求先

上記URL参照。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

松田医科工業株式会社

問い合わせ窓口「お客様相談室」

電話番号: 03-3814-6660

発売元

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

電話番号: 03-3811-1001