

販売名： マニセプス

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

本製品は、高温、高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵、保管すること。また、水濡れや直射日光は避けるよう細心の注意を払うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 錆を防ぐために以下のことを守ること。
 - 1) 使用後は直ちに清水で洗浄を行うこと。
 - 2) 汚れが残った状態で滅菌、消毒を行わないこと。
2. 使用後は、接合部（BOX等）、穴部分、先端部に汚れ、変形、キズ、ヒビ割れ、破損、磨耗、機能低下等がないか。動作、外観に異常がないか点検を行うこと。
3. 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：マニー株式会社

TEL：028-667-8345 FAX:028-667-8305

販売元：*alfresa*

アルフレッサ ファーマ株式会社

TEL：06-6941-0303 FAX:06-6941-4866