

2017 年 4 月 10 日改訂(第二版)(新記載要項に基づく改訂)
2006 年 12 月 1 日作成

医療機器届出番号:23B3X00009000003

一般医療機器 医 04 整形用品 医療ガーゼ 13700000

ベニツル ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

純綿糸を平織した布を脱脂・漂白して製造された綿100%のガーゼで、タイプ I 形状(1cm²内に縦糸 12±1 本×横糸 12±1 本)にて織り込んだものである
本品は無蛍光の白い布で、においや味はない

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする

【使用方法等】

適宜使用すること

滅菌して使用する場合は高压蒸気(オートクレーブ)滅菌又はエチレンオキシドガス滅菌にて行うこと

【使用上の注意】

体内に留置しないこと

滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと

包装が開封・破損・汚損している場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

【保管方法及び有効期間等】

水に濡らさないよう注意し、高温、多湿、直射日光及び火気をさけ、清潔な場所に保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

松前衛生材料株式会社

〒451-0021 愛知県名古屋市中区天塚町3丁目 57 番地

お問い合わせ先(TEL)052-521-1100