

2017年4月10日改訂(第二版)(新記載要項に基づく改訂)

2006年12月1日作成

医療機器届出番号:23B3X00009000004

一般医療機器 医 04 整形用品 X線造影材入りガーゼ 32374000

ベニツル尺角ガーゼX(青)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
(X線造影糸が切断又は脱落して、体内に残存するおそれがある)

【形状・構造及び原理等】

綿100%ガーゼにX線造影糸を入れた製品です。

X線造影糸の材質:(固定材)ポリプロピレン、ポリエステル他

(造影剤)硫酸バリウム (着色剤)深海青グレード02

【使用目的又は効果】

創傷面の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布等に用いる。

X線造影糸により、X線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

【使用方法等】

使用目的に応じて滅菌して、適宜使用する。

滅菌して使用する場合は、高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌又はエチレンオキシドガス(EOG)滅菌に限る。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

再滅菌しないこと。

【保管方法および有効期間等】

直射日光、高温多湿及び火気を避け、清潔な場所に保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

松前衛生材料株式会社

〒451-0021 愛知県名古屋市区天塚町3丁目57番地

お問い合わせ先 (TEL)052-521-1100