

2018 年 02 月改訂(第二版)新記載要項に基づく改訂

2008 年 10 月作成

医療機器届出番号:23B3X00009000008

一般医療機器 医 04 整形用品 コットンボール 11028000

ベニツル A.C.F.コート綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

綿繊維を脱脂したものを球状製品にし、微小セルロース繊維を噴霧したものである。

本品は白色の綿繊維で、においや味はない。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬剤を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

使用目的に応じて滅菌して、適宜使用する。

滅菌は、EOG滅菌を行う。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。

使用後廃棄する場合は、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。

【保管方法および有効期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松前衛生材料株式会社

〒451-0021 愛知県名古屋市中区天塚町3丁目 57 番地

お問い合わせ先(TEL)052-521-1100