

2017年11月25日改訂(第二版)(新記載要項に基づく改訂)

2014年7月11日作成

医療機器届出番号:23B3X00009000101

一般医療機器 医04 整形用品 医療脱脂綿 70975000

NSコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

Gossypium hirsutum Linne 又はその他同属植物 (Malvaceae)の種子の毛を脱脂し、漂白した綿 100%の脱脂綿

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること
滅菌して使用する場合は高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌又はエチレンオキシドガス滅菌にて行うこと

【使用上の注意】

体内に留置しないこと
滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと
水に濡らさないこと
包装が開封・破損・汚損している場合は使用しないこと
開封後は早めに使用すること

【保管方法及び有効期間等】

保存中の水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所や火気を避け、清潔な場所に保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

松前衛生材料株式会社

〒451-0021

愛知県名古屋市西区天塚町3丁目57番地

(TEL)052-521-1100

販売元及び問い合わせ窓口

西尾衛生材料株式会社

〒451-0074

愛知県名古屋市西区万代町1丁目10番地

(TEL)052-522-5251