

2017 年 4 月 10 日改訂（第二版）（新記載要項に基づく改訂）

2015 年 3 月 10 日作成

医療機器届出番号:23B3X00009000108

一般医療機器 医 04 整形用品 医療ガーゼ 13700000

NS裁断ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

純綿糸を平織した布を脱脂・漂白して製造された、綿
100%ガーゼである

本品は無蛍光の白い布で、においや味はない

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から
の器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又
は内部構造に適用することを目的とする

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること

滅菌して使用する場合は高圧蒸気(オートクレーブ)滅
菌又はエチレンオキサイドガス滅菌にて行うこと

【使用上の注意】

体内に留置しないこと

包装が開封・破損・汚損している場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと

【保管方法および有効期間等】

保存中の水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の
あたる場所や火気を避け、清潔な場所に保管すること

【包装】

パッケージに記載

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

松前衛生材料株式会社

〒451-0021

愛知県名古屋市西区天塚町3丁目 57 番地

(TEL)052-521-1100

販売元及び添付文書請求先

西尾衛生材料株式会社

〒451-0074

愛知県名古屋市西区万代町1丁目10番地

(TEL)052-522-5251