



機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 吸引チューブ 16779000

PureView 除煙フィルター

再使用禁止 一般医療機器

【禁忌・禁止】

(使用方法)

- ・再滅菌禁止[品質の低下や汚染の可能性ある]
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はラテックスフリーである。
本システムの構成は以下のとおり。



【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけ室温で保管
有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社
連絡先電話：03-6894-0000(代表)

本添付文書に該当する製品の製品名、製品(カタログ)番号、サイズ等については包装表示ラベルの記載を確認すること。

【原理】

本品の片端をトロッカーに、もう一端を吸引装置に接続して、術中に発生する煙や粒状物質をフィルタでろ過して排気する。シェル内には、フィルタのつまりを軽減するための液体トラップが内蔵されている。また、チューブの途中にある流量調節バルブで吸引量を調節する。

【使用目的又は効果】

本品は、電気手術器の使用時に発生する煙や粒状物質等をろ過するために、吸引装置との接続に用いるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) トロッカー接続チューブをトロッカー★に接続し、吸引装置接続チューブを吸引装置★に接続する。
- 2) 流量調節バルブで吸引量を調節する。

★本添付文書に含まれない。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 吸引圧は 100 mmHg～400mmHg の範囲で設定すること。
- 2) 流量調節バルブを 0 の位置に戻して廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 無菌包装に欠陥のある製品は使用せず全て返送すること。
再滅菌は行わないこと。
- 2) 吸引チューブに詰まり、閉塞、ねじれがないことを常時確認すること。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合が発現する可能性がある。

1) 不具合

〔その他の不具合〕

- 1) 本品と併用機器の接続不良による機能不全