



セーフエアーコンパクト用チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

(使用方法)

- ・ 再使用禁止
- (併用医療機器)
- ・ 他社製品（指定製品以外）との併用（「相互作用」の項参照）

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造及び原理等

本添付文書に該当する製品の製品名、製品（カタログ）番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

〔原理〕

排煙装置★と液体回収容器★とを接続し、気体を吸引する。

★本添付文書に含まず

【使用目的又は効果】

本品は、外科手術時、排煙装置と液体回収容器とを接続し、煙等の気体を吸引するプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品を排煙装置★及び液体回収容器★に接続する。
 - 2) 本品は単回使用機器である。使用後は適切に廃棄する。
- ★本添付文書に含まず

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 液体の吸引に使用しないこと。排煙装置に液体が侵入すると排煙装置が破損するおそれがある。
- 2) 捻れたり折れ曲がったりしないように使用すること。
- 3) 本品は排煙装置と液体回収容器とを接続するチューブであるため、術野からの直接の煙の吸引に本品を使用しないこと。
- 4) チューブを閉塞しないこと。

【使用上の注意】

1. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器 の名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
他社製品 （指定製 品以外）	不具合による危険 性が高まるおそれ がある。	仕様に適合しないため、 正しく接続できないかつ 異常動作が発生する。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1) 不具合

【その他の不具合】

- 1) 本品の破損、変形、損傷

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけ保管

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社

連絡先電話：03-6894-0000（代表）