



ストライカー ラパロスコピック電極

【警告】

(使用方法)

- ・患者や術者に対する熱傷や感電の危険をさけるため、【使用上の注意】に特に注意し、電気手術に関する原理や使用方法について、十分に理解して使用すること。
- ・電気手術器の出力は 10,000V (Peak - to - Peak) を超えないこと [絶縁破壊や破損事故等の可能性がある]

【禁忌・禁止】

(適用対象 (患者))

- ・心臓ペースメーカーを装着している患者には使用しないこと (やむをえず使用する場合は、ペースメーカーの動作不良や心室細動等の危険性があるため、その分野の権威者やペースメーカーの製造者に危険性について確認すること)

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレス鋼、合成樹脂

★ステンレス鋼にはニッケルが含まれている。

2. 形状・構造及び原理等

本システムの構成は以下のとおり。

- ・剪刀型電極／鉗子型電極 (インサート)
タイプ 1



タイプ 2



- ・凝固電極
タイプ 1



タイプ 2 (ストライクフロー用電極)




- ・ストライクフロー用 シース




- ・ハンドル


タイプ 1 (剪刀型電極／鉗子型電極の タイプ 1 と接続する)

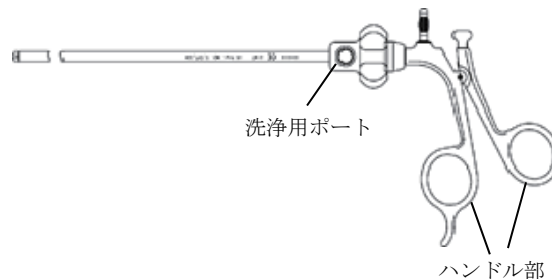

タイプ 2 (ピークハンドル、剪刀型電極／鉗子型電極のタイプ 1 と接続する)

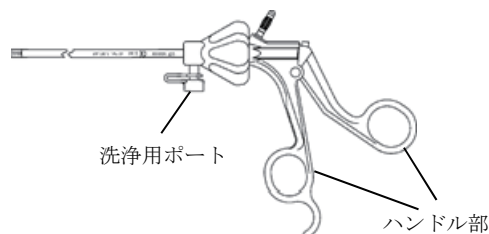

タイプ 3 (ピークハンドル、剪刀型電極／鉗子型電極のタイプ 2 と接続する)

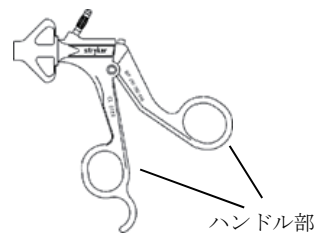

本添付文書に該当する製品の製品名、製品 (カタログ) 番号、サイズ等については包装表示ラベルの記載を確認すること。

【原理】

内視鏡手術において、腹腔内に経皮穿刺した市販の穿刺器 (トロカール) を介して腹腔内へ挿入し、市販の電気手術器に接続して、組織の切開及び凝固等を行う。電気手術器の出力を行うと、電極コードを通じて本品の電極部から生体組織へ高周波電流が流れる。そのときに生じるジュール熱により組織の切開及び凝固等を行う。

【使用目的又は効果】

内視鏡的に組織の切断、切除、切開、止血、凝固、蒸散又は剥離をすること。

【使用方法等】

1. 使用前

* 本品は未滅菌品のため、使用に際しては必ず洗浄を行い下記の条件又は各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行う。

* 標準的滅菌条件：

1) 剪刀型電極、鉗子型電極及びハンドル

滅菌方法	高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌）			
	重力置換	プレバ キューム 1	プレバ キューム 2	フラッシュ プレバ キューム
温度	121℃	132℃	134℃	132℃
曝露時間	50 分	4 分	3 分	4 分
乾燥時間	35 分	30 分	30 分	なし
包装	二重包装 を行う	二重包装 を行う	二重包装 を行う	包装を行 わない

2) 凝固電極タイプ 1

滅菌方法	高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌）			
	重力置換 1	重力置換 2	プレバ キューム	フラッシュ 重力置換
温度	132℃	121℃	132- 133℃	132- 133℃
曝露時間	35 分	50 分	4 分	5 分
乾燥時間	なし	なし	なし	なし
包装	包装を行 う	包装を行 う	包装を行 う	包装を行 わない

3) 凝固電極タイプ 2 及び凝固電極用被膜チューブ

滅菌方法	高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌）			
	重力置換 1	重力置換 2	プレバ キューム	フラッシュ
温度	121℃以 上	132℃以 上	132℃以 上	132℃以 上
曝露時間	50 分以上	35 分以上	4 分以上	5 分以上
乾燥時間	なし	なし	4 分	なし
包装	包装を行 う	包装を行 う	包装を行 う	包装を行 わない

2. 使用方法

- * 1) 電極コード接続部に電気手術器の電極コード★を接続する。
- * 2) 内視鏡★で観察を行いながら、あらかじめ腹腔内に経皮穿刺したトロカール★を通して挿入する。
- * 3) 患部組織の切開凝固等の処置を行う。
 - * ★本添付文書に含まれない。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 凝固電極の再使用は 20 回を越えないこと〔絶縁破壊・破損の可能性がある〕。
- 2) 本品は専門の医師のみが使用すること。
- 3) 本品を他の医療用電気機器と同時に使用した場合、漏れ電流が増加することがある。患者漏れ電流の総和を最小にするため、すべての装着部を有する機器は、CF 形装着部を有する機器を用いることが望ましい。必ず JIS T 0601 - 1-1 (IEC 60601 - 1 - 1) の要件に従いすべてのシステムを設置すること。
- 4) 本品と一緒に使用する内視鏡機器は IEC60601 - 2 - 18 に適合するものを使用すること。
- 5) 可能な限り清掃及び消毒には不燃性物質を使用することが望ましい。
- 6) 掃除若しくは消毒に用いる又は接着用の溶剤として用いる可燃性物質は、電気手術器を使用する前に蒸発させる

ことが望ましい。

- 7) 患者の身体の下又はへそ（臍）などの体の陥凹部、及びちつ（膣）などの体くう（腔）に可燃性溶液が蓄積する危険がある。これらの部位に蓄積された液体を、電気手術器を使用する前に、ふき取ることが望ましい。また、体内から生じるガスの引火の危険性にも注意すること。例えば、綿、ウール及びガーゼのように、ある素材が酸素を含んでいる場合、正常な使用における電気手術器で生じる火花によって引火する可能性がある。
- 8) 本品を高濃度の爆発性ガスの存在下で使用しないこと。
- 9) 不要な目的外低周波成分の発生または分流をさけるため、鉗子などの金属物に対して放電させ、凝固などの処置を行ってはならない。
- 10) 手術用の電極コードは、患者または他のコードと接触しないように配置する。
- 11) 一時的に使用しないアクティブ電極は、フットスイッチの不意の動作による事故を防ぐため、また、使用したばかりのアクティブ電極は、しばらくの間熱傷や火災を発生させ得る熱を持つため、アクティブ電極は必ず電気的、熱的に絶縁されたホルダーに置くこと（決してそれを患者に接触する可能性のある場所に置いてはならない）。
- 12) 出力する前にアクティブ電極を術部に位置すること（出力しながら術部にあてないこと）。[火花放電による電流の変調作用が原因で、細動や、神経・筋の刺激が起こったり、術部位外での熱傷や分流のおそれがあるため]
- 13) 出力設定は、意図した目的を達成するために必要最小限にする。
- 14) 通常の出力設定で切開又は凝固の機能が低下した場合は、出力を増加するに先立って、アクティブ電極上の炭化物の付着、対極板コードの接続及び対極板の患者への接触を再確認すること [そのまま使用すると、対極板の接触部で熱傷を生じるおそれがある]。
- 15) 対極板は、できるだけ術野の近くで、患者の身体にその全面積を密着させる。
- 16) 患者に電気手術器と生体信号監視装置を同時に使用する場合は、モニタ電極はできるだけ手術用の電極（アクティブ電極および対極板）から離して装着する。針状のモニタ電極は、推奨できない。いかなる場合でも、高周波電流を制限する装置を備えた生体信号監視装置を推奨する。
- 17) 電極コードは、使用前に絶縁破壊がないか十分に確認すること。
- 18) 使用前にハンドルとインサート（アクティブ電極）が確実に装着されていることを確認すること [装着が不完全の場合事故の原因となるため]。
- 19) 器具を金属製物体などに接触／衝突させないこと。器具を曲げたり、無理にこじたりしないこと。過度の力でハンドルを握ると、先端電極部（刃先）や器具が破損する可能性があるため、注意すること。ハンドルを握り把持した状態で、過度にハンドルを回転させると、先端電極部（刃先）が破損する可能性があるため、注意すること [器具の一部が破損し破片が創傷内に残留して除去し難い場合があるため]。
- 20) 凝固用電極（ストライクフロー用電極）の先端チップをひも等で縛らないこと。[破損の可能性がある]
- 21) 接地した又は大地に対して大きな静電容量をもった金属部分（例えば、手術台の支持部など）に患者を接触させない。この目的のために、絶縁シーツを使うことを推奨する。
- 22) 皮膚と皮膚の接触（例えば、患者の腕と身体の間）は、例えば、乾いたガーゼを挿入するなどしてさける。
- 23) 本品と併用する電気手術器、光源装置、その他の付属品は、使用前にそれらの説明書を熟読すること。他の電気機器及び付属品を併用する場合は、絶縁や接地が十分か、妨害がなされていないか確認の上使用すること。
- 24) 電気手術器の出力中は、灌流を行わないこと。
- 25) 電気手術器を出力するときは感電のリスクを最小限にするために保護グローブを着用すること。
- 26) 本品をパイボラ出力により使用しないこと。

取扱説明書等を必ず参照する

- 27) 内視鏡と一緒に使用する適用可能な液体について不確かなときは、権威者に確認すること。
- 28) 本品と金属製カニューラ（トロカール）の併用はさけること。
- 29) 電極部は絶縁の部分以外は把持しないこと。
- 30) 本品は精密機器であるので、組立・分解・操作・洗浄・消毒・滅菌等慎重に取り扱うこと。
- 31) 本品は、取扱説明書に記載された以上の分解は行わないこと。
- 32) 改造、誤用、不適切な取り付けや操作が行われた器具、あるいは日本ストライカー㈱のサービス担当者以外の者が、修理点検した器具は使用しないこと。

血液等異物が付着していないことを確認し、操作方法又は使用方法欄に示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行い保管すること。

- * 10) 詳細な洗浄方法、滅菌方法、点検方法については取扱説明書を必ず参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社

連絡先電話：03-6894-0000（代表）

- * 製造業者：ストライカー エンドスコーピー社
Stryker Endoscopy（アメリカ）

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）
電気手術器添付文書の相互作用の項を参照すること。

3. 不具合・有害事象

以下の不具合が発現する可能性がある。

（1）不具合

〔その他の不具合〕

- 1) 機器の不適切な使用による破損、変形、損傷、腐食
- 2) 機器の使用中の過負荷による、術野における手術器具の破損、折損
- 3) 繰り返し使用による機器の疲労破損

（2）有害事象

〔重大な有害事象〕

- 1) 不適切な取扱いによる医師及び患者への電氣的ショック及び熱傷
- 2) 機器の不適切な使用又は破損による神経学的合併症、麻痺、手術による疼痛や軟部組織、内臓あるいは関節の損傷
- 3) 感染症
- 4) 手術による神経組織の損傷、脊髄硬膜の損傷、硬膜液漏洩、血管の圧迫、周辺臓器の損傷
- 5) 破損した器具の破片の損傷内残留

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。

【保管方法及び有効期間等】

- * 保管方法：高温、多湿、直射日光をさけ室温で保管

【保守・点検に係る事項】

- 1) 器具は使用前後に必ず点検すること。使用中に問題点やその疑いを認めた場合には、直ちに使用を中止し、点検や修理を依頼すること。電極部にかえり（まくれ）や傷があると円滑な切開／凝固・把持ができないので使用しないこと。
- 2) 使用前後に本品に汚れ、腐食、損傷等の異常がないことを確認すること。特にインサートの先端部および絶縁樹脂・絶縁被膜のひび割れ、破壊等を調べること。
- 3) 使用前後に先端部分や先端を動かすヒンジ部分に錆がないかどうかを確認すること。僅かでも錆が確認された場合には、破損事故などの原因になるおそれがあるので使用しないこと。
- 4) 接続部のネジの装着状態を確認すること。緩みが確認された場合には破損事故などの可能性があるので使用しないこと。
- 5) 先端の刃の噛み合わせが悪い場合には、正常な作業ができない可能性があり、また破損事故などの原因となるので使用しないこと。
- 6) シャフト部が曲がっていないかどうかを確認すること。弯曲している場合には、正常な作業ができない可能性があり、また破損事故などの原因となるおそれがあるので使用しないこと。
- 7) 把持部分の動きを確認すること。動きが不自然な場合には、破損事故などの原因となるおそれがあるので使用しないこと。
- 8) ある程度の高さから落下したり、他の物体と衝突した器具は、使用前にその作動を必ず確認すること。少しでも先端に抵抗があったり、作動が不自然な場合は、破損事故などの原因になるおそれがあるので使用しないこと。
- 9) 本品使用後は、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行った後、

取扱説明書等を必ず参照する

[型番及び名称]

型番	名 称
0250080264	メツツエンバーム型剪刀 インサート 5MM 用 33CM 直
0250080265	メツツエンバーム型剪刀 インサート 5MM 用 33CM ロングカーブ
0250080260	フック型剪刀 インサート径 5MM
0250080573	フック型剪刀 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080262	腹膜剪刀 インサート 5MM 用 33CM
0250080263	メツツエンバーム型剪刀 インサート 5MM 用 33CM ロング 直
0250080266	ミニメツツエンバーム型 剪刀 インサート 5MM 33CM カーブ
0250080574	ミニメツツエンバーム型剪刀 インサート 5MM 径 45CM 長 カーブ
0250080267	エンド メツツエンバーム型 剪刀 インサート 5MM 33CM カーブ
0250080575	エンド メツツエンバーム型剪刀 インサート 5MM 径 45CM 長 カーブ
0250080269	マイクロ型 剪刀 インサート 5MM 33CM 直
0250080270	マイクロ型 剪刀 インサート 5MM 33CM カーブ
0250080247	鋸刃型剪刀 インサート 10MM 径 33CM 長
0250282000	メツツエンバーム型剪刀 インサート 3MM 径 20CM 長 カーブ
0250282047	メツツエンバーム型剪刀 インサート 3MM 径 29CM 長 カーブ
0250282001	腹膜剪刀 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282048	腹膜剪刀 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282002	フック型剪刀 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282049	フック型剪刀 インサート 3MM 径 29CM 長
0250080280	ドルフィンノーズ剥離鉗子 5mm 用 33cm
0250080577	ドルフィンノーズ剥離鉗子 5mm 用 45cm
0250080281	ブレットテーパー鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080314	ディペーキー把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080748	ディペーキー把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080286	鋸刃型把持鉗子 インサート 5MM 用 33CM
0250080579	鋸歯型把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080287	ナロージョー型把持鉗子 インサート 5MM 用 33CM
0250080282	メリーランド剥離鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 カーブ
0250080578	メリーランド剥離鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080315	フンダス把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080735	フンダス把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080316	アリゲーター把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080317	コブラ把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080283	ケリー剥離鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 カーブ
0250080285	ミクスター鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080288	ニードルノーズ剥離鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080284	組織把持鉗子 インサート 45 度 5MM 33CM
0250080325	マイクロ把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長

型番	名 称
0250080310	アトラウマチック把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 シングルアクション
0250080584	アトラウマチック把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM シングルアクション
0250080311	アトラウマチック把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 ダブルアクション
0250080585	アトラウマチック把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM ダブルアクション
0250080312	シャーテル把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 有窓
0250080313	ブラント把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080591	アリス把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 シングル歯
0250080592	アリス把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 ダブル歯
0250080318	鋸歯型把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 有窓
0250080732	有窓把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080319	ドーシー把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080736	ドーシー把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080320	ストロング把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 有窓
0250080321	バブコック把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080586	バブコック把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080322	デリケート把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長 有窓
0250080323	卵巣把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080324	卵管把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080587	卵管把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080290	バイオブシー パンチ インサート 5MM 33CM
0250080580	バイオブシー パンチ インサート 5MM 径 45CM 長
0250080291	バイオブシースプーン鉗子 インサート 5MM 径 33CM ピン付ダブルアクション
0250080581	バイオブシースプーン鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長 ピン付き
0250080292	ブレイクスリー バイオブシー鉗子 インサート 5MM 33CM
0250080293	バイオブシースプーン鉗子 インサート 5MM 径 33CM ピン付シングルアクション
0250080240	アリス把持鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080241	バブコック把持鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080242	ペニン-ton 把持鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080243	ケルン把持鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080244	クロー鉗子シングルアクション インサート 10MM 径 33CM 長
0250080245	クロー鉗子ダブルアクション インサート 10MM 径 33CM 長
0250080246	バイオブシースプーン鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080248	メリーランド剥離鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080249	ミクスター鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080250	バドルバブコック把持鉗子 インサート 10MM 径 33CM 長
0250080694	ライトアングル剥離鉗子 インサート 5MM 径

取扱説明書等を必ず参照する

型番	名 称
	33CM 長
0250080729	ライトアングル剥離鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080697	有鉤把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080725	有鉤把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080698	テナクルム鉗子 インサート 5MM 33CM
0250080699	エンド把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080726	エンド把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080700	パドルバブコック把持鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080727	パドルバブコック把持鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080733	パーク鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080745	パーク鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080763	ジョアン鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080764	ジョアン鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250080757	ライトアングル 剥離鉗子 インサート ロングジョウ 5MM 径 33CM 長
0250080761	ライトアングル 剥離鉗子 インサート ロングジョウ 5MM 径 45CM 長
0250080760	切除 鉗子 インサート 5MM 径 33CM 長
0250080762	切除 鉗子 インサート 5MM 径 45CM 長
0250282005	ニードルノーズ剥離鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282052	ニードルノーズ剥離鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282010	ブレットテーパー鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282057	ブレットテーパー鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282011	メリーランド剥離鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282058	メリーランド剥離鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282003	ファンダス把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282050	ファンダス把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282004	アリゲーター把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282051	アリゲーター把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282006	シャーテル把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長 有窓
0250282053	シャーテル把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長 有窓
0250282007	コブラ把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282054	コブラ把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282008	ブラント把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長 スプーン付
0250282055	ブラント把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長 スプーン付
0250282009	ブラント把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282056	ブラント把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282096	ドーシー把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282097	ドーシー把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282100	アトラウマチック把持鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長 ダブルアクション
0250282101	アトラウマチック把持鉗子 インサート 3MM 径

型番	名 称
	29CM 長 ダブルアクション
0250282099	アトラウマチック把持鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長 シングルアクション
0250282012	バイオブシー鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282059	バイオブシー鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282013	バイオブシーパンチ インサート 3MM 径 20CM 長
0250282060	バイオブシーパンチ インサート 3MM 径 29CM 長
0250282104	ライトアングル 剥離鉗子 インサート 3MM 径 20CM 長
0250282105	ライトアングル 剥離鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282110	切除 鉗子 インサート 3MM 径 29CM 長
0250282103	バブコック 把持鉗子 3MM 径 29CM 長
0250040111	モノポーラヘラ型電極 5MM33CM
0250040116	モノポーラ電極 ヘラ型 5MM 径 45CM 長
0250040112	モノポーラ L 型電極 5MM33CM
0250040117	モノポーラ電極 L 型 5MM 径 45CM 長
0250040113	モノポーラ J 型電極 5MM33CM
0250040118	モノポーラ電極 J 型 5MM 径 45CM 長
0250070441	ストライクフロー 電極先スパチュラ型 全長 32CM 径 5MM
0250070451	ストライクフロー 電極先スパチュラ型 全長 45CM 径 5MM
0250070442	ストライクフロー 電極先 J 型 全長 32CM 径 5MM
0250070452	ストライクフロー 電極先 J 型 全長 45CM 径 5MM
0250070443	ストライクフロー 電極先 L 型 全長 32CM 径 5MM
0250070453	ストライクフロー 電極先 L 型 全長 45M 径 5MM
0250070445	ストライクフロー 電極先ニードル型 全長 32CM 径 5MM
0250070455	ストライクフロー 電極先ニードル型 全長 45CM 径 5MM
0250070460	ストライクフロー 電極先用 シース全長 32CM 径 5MM
0250070450	ストライクフロー 電極先用 シース全長 45CM 径 5MM
0250080233	5MM 用鉗子ハンドル被覆型
0250080595	モノポーラハンドル 5MM 径 45CM 用
0250080231	10MM 用鉗子ハンドル被覆型
0250080617	PEEK モノポーラハンドル 5MM 用 33CM
0250181164	ピークモノポーラハンドル 5MM 径 45CM 用
0250080618	PEEK モノポーラハンドル 10MM 33CM 用
0250181106	PEEK マルチファンクションハンドル 5MM 33CM 用
0250181108	ピークマルチファンクションハンドル 5MM 径 45CM 用
0250181107	PEEK マルチファンクションハンドル 10MM 用 33CM
0250282045	ピークモノポーラハンドル用 3MM 径 20CM/29CM 用
0250282046	ピークマルチファンクションハンドル 3MM 径 20CM/29CM 用

取扱説明書等を必ず参照する