

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 JMDN コード：70948009

再使用禁止

デイスボ喉頭鏡セット

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・ 使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・ 本品を分解・改造しないで下さい。
- ・ すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
- ・ すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。
- ・ 再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

ブレード、ハンドルから構成される。
ハンドルには電球が内蔵されている。

マッキントッシュ型ブレード


ハンドル（単 2 乾電池×2 コ使用）

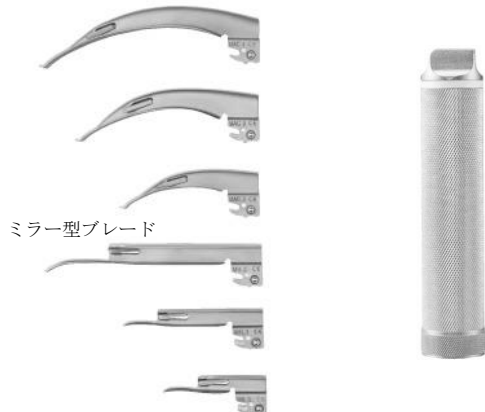

寸法

規格	全長
ミラー型ブレード No. 0	79mm
ミラー型ブレード No. 1	105mm
ミラー型ブレード No. 2	160mm
マッキントッシュ型ブレード No. 2	105mm
マッキントッシュ型ブレード No. 3	135mm
マッキントッシュ型ブレード No. 4	155mm
ハンドル	145mm

セット例

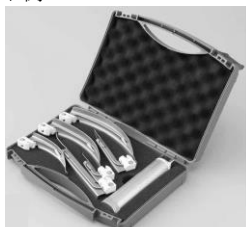

2. 原材料

ブレード：アルミ
ハンドル：ステンレス

3. 原理

ハンドルに電池を入れ、ブレードを取り付けて使用状態にセットすると、ブレードがハンドル上部のスイッチを押し、ブレードに内蔵されているファイバーを経由して光源が先端まで送られ、喉頭を照射する事で喉頭の観察を容易にする。

【使用目的又は効果】

本製品は、麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管への気管内チューブの挿入や配置をしたり、異物を除去したりするために用いる器具である。また、喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。

【使用方法等】

1. ブレードは使用前に、洗浄・消毒、必要に応じて滅菌する（EOG 滅菌可能）。
2. ハンドルに電池を入れる。
3. 適切なブレードサイズを選択する。
4. ブレードの根元に凹んだ部分をハンドル上部にある接続部に奥まで差し込んで、カチッという音を確認し、取り付ける。
5. ブレードを起し、カチッと音でしっかり噛み合う事を確認し、同時に、ブレード先端から発光される事を確認する。
6. 使用後はブレードを前向けに倒して、先端の光を消灯する。
7. ブレードをハンドルから取り外す。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外に使用しないで下さい。
2. 本品を分解・改造しないで下さい。
3. 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
4. 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を採って下さい。
5. 単回使用のため再使用をしないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に、正常かつ安全な動作とハンドルのランプが点灯することを確認して下さい。
2. 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を採って下さい。
3. 単回使用のため再使用をしないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

ASIA CONNECTION CO., LTD.（台湾）