

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 一般的名称：鉗子 JMDN コード：10861001

プラスチック鉗子

【禁忌・禁止】

- ・本品は再使用可能ですが、乾燥工程で乾燥温度の設定機能の無いオートクレーブでの滅菌は変形する可能性があります。
- ・本品を改造しないで下さい。*
- ・本品を使用目的以外に使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

(1) プラスチックタオル鉗子



寸法（全長）100mm

(2) プラスチック万能鉗子



寸法（全長）130mm

(3) プラスチック綿球鉗子（大）



寸法（全長）240mm

(4) プラスチック綿球鉗子（小）



寸法（全長）190mm

(5) プラスチックタオルクランプ



寸法（全長）70mm

2. 原材料

	形状	材質
1	プラスチックタオル鉗子	ポリプロピレン 70% ガラス繊維 30%
2	プラスチック万能鉗子	
3	プラスチック綿球鉗子（大）	
4	プラスチック綿球鉗子（小）	
5	プラスチックタオルクランプ	ポリオキシメチレン

耐熱温度 134℃

3. 原理

ハンドル部を操作することにより、先端部が開閉する。

【使用目的又は効果】

本品は、プラスチックで製作されており、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具である。本品は、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本品の把持部を開く。
2. 本品の把持部で臓器、組織又は血管を非外傷性に把持する。

【使用上の注意】

1. 使用前に本品が洗浄・滅菌されていること、また亀裂や損傷、可動部の異常等がないことを確認すること。*
2. 異常が発見された場合は、使用を中止すること。
3. 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。
4. 使用後、本品に破損・欠損等の異常がないことを確認すること。また、付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・固化しないうちに、できるだけ早く洗浄すること。
5. 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管すること。
6. 本品は再使用可能で、オートクレーブでの滅菌は耐えられるが、乾燥装置に温度保証のない機器では変形する可能性がある。
7. EOGガス滅菌可能、オートクレーブ滅菌可能（132℃）消毒用アルコールでの消毒は可能。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
(1) 直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

BASTOS VIEGAS,S.A. (PORTUGAL)