

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 一般の名称：ピンセット JMDN コード：35079001
プラスチックピンセット

【禁忌・禁止】

- ・本品は再使用可能ですが、乾燥工程で乾燥温度の設定機能の無いオートクレーブでの滅菌は変形する可能性があります。
- ・本品を改造しないで下さい。*
- ・本品を使用目的以外に使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

- (1) プラスチックピンセット



寸法（全長）130mm

- (2) プラスチック綿球ピンセット



寸法（全長）140mm

2. 原材料

ポリプロピレン 70%
ガラス繊維 30%

耐熱温度 134℃

3. 原理

2枚の先端部を閉じることによって物体を保持する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ器具である。又、把持部と保持部により構成されたプラスチック製のピンセットである。本品は、再使用可能である。

【使用方法等】

保持部を握ると、把持部が閉じる。開くときには握る力を弱める。
（潜在的なバネの反発力を利用する）

【使用上の注意】

1. 使用前に本品が洗浄・滅菌されていること、また亀裂や損傷、可動部の異常等がないことを確認すること。*
2. 異常が発見された場合は、使用を中止すること。
3. 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。
4. 使用後、本品に破損・欠損等の異常がないことを確認すること。
また、付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・固化しないうちに、できるだけ早く洗浄すること。
5. 洗浄後は滅菌し、次回の使用に備えて適切に保管すること。
6. 本品は再使用可能で、オートクレーブでの滅菌は耐えられるが、乾燥装置に温度保証のない機器では変形する可能性がある。
7. EOGガス滅菌可能、オートクレーブ滅菌可能（132℃）消毒用アルコールでの消毒は可能。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 引火性ガスが発生する場所や、熱源近くでの保管は避けて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

BASTOS VIEGAS,S.A. (PORTUGAL)