

医 0 3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 一般的名称：非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード：70976000

マツヨシ検査・検診用ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品は、ニトリル合成ゴムを主材料とする、検査・検診用の使い捨て手袋である。
左右兼用であり、パウダーなしの未滅菌である。

〔主要寸法〕

掌幅：S/80±10mm、M/95±10mm、L/110±10mm

全長：約 230mm 以上

厚さ：指部/0.09±0.02mm、掌部/0.06±0.02mm

〈入数〉

100 枚/箱

〈性能〉

引っ張り強度

（老化前）14MPa 以上 （老化後）14MPa 以上

最大伸長度

（老化前）500%以上 （老化後）400%以上

【使用目的又は効果】

本製品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 小箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より本製品を丁寧に取り出して装着する。

〈装着時の注意〉

1. 手袋の挿入口を引っ張らずに装着して下さい。
挿入口は薄くなっているため、破れの原因となります。
2. 指先をフィットさせてから、爪をたてずゆっくりと装着して下さい。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

1. 使用目的以外に使用しないで下さい。
2. 使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生する場合がありますので、異常を感じた時には、直ちに使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を行って下さい。
3. 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品に異常（破損やピンホール等）が見られるものは、使用しないで下さい。
4. 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないで下さい。
5. 使用後の本製品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分して下さい。
6. 本製品は使い捨ての手袋です。繰り返しの使用はしないで下さい。
7. 薬品や薬液等によっては膨張・浸透するおそれがあるので、十分確認して使用して下さい。

〈重要な基本的注意〉

1. 刃物や爪先等の尖ったものに触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意して下さい。
2. 火、熱、熱湯等の熱源に触れさせないで下さい。

〈その他注意事項〉

1. 着色ムラがある場合がございますが、品質上の問題はございません。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

1. 包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないで保管して下さい。
2. 直射日光や高温多湿を避けて常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管して下さい。

〈有効期間〉

包装材に記載のとおり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者
松吉医科器械株式会社
住所：〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9
電話：03-5816-8819
2. 製造業者
GuangDong Kingfa Science and Technology CO.,Ltd.（中国）