

機械器具 02 医療用照明器

一般医療機器 一般の名称: 移動型診療用照明器 JMDNコード: 36843000

LED照明灯 ヘプタ

【禁忌・禁止】


- ・ 使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・ 本品の二次的加工をしないで下さい。
- ・ 電源の周波数と電圧及び許容電流値に注意して下さい。
- ・ すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 製品を、平らな場所に置く。
- (2) 電源コードをコンセントに接続する。
- (3) 電源スイッチをONにし、点灯する。
- (4) 照明の向きを適切に調整する。
- (5) 電源スイッチをOFFにし、消灯する。
- (6) 電源コードをコンセントから抜く。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

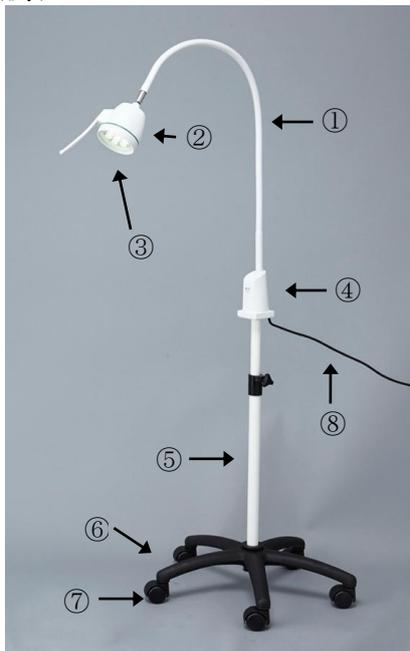

①フレキシブルアーム

②灯部

③LED ランプ

④電源スイッチ

⑤ポール部

⑥脚部

⑦キャスター

⑧電源コード

寸法: W52XD52XH80~205cm

*フレキシブルアーム寸法: 約 85cm

2. 電氣的定格

使用光源	LED ランプ
LED 数	7 個
定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	7W

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、診療用照明器のすべての特性を備える照明器をいう。通常、軽症の診療及び治療時に用いる。ある場所から別の場所へ容易に移動できるよう設計されている。

【品目仕様等】

最高照度	約 47500Lux (距離 30 cm)
色温度	約 5500K

【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外に使用しないで下さい。
- (2) 本品の二次的加工をしないで下さい。
- (3) 電源の周波数と電圧及び許容電流値に注意して下さい。
- (4) すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
- (5) 点灯中は灯部及び LED ランプが温かくなります。直接触らないようにして下さい。
- (6) 故障または異常が発生したときは、その程度に応じて電源スイッチを切って消灯するなど、速やかに適切かつ安全な処置を採って下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 常温・常圧下、水のかからない場所に保管して下さい。
- (2) 引火性ガスが発生する場所や、熱源近くでの保管は避けて下さい。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用前に、正常かつ安全な作動とランプが点灯することを確認して下さい。
- (2) 照明が暗くなったとき又は照明が点かないときは、LED ランプに直接触れないように注意しながら、LED ランプの交換を行って下さい。

【包装】

1 台/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所: 〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9

電話: 03-5816-8819

製造業者

L. I. D. sotramet (フランス)