

医04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

地球トンボ印カット綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿100%の脱脂綿製品。
- 2) 本品は白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はなく、セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封したものは早めに使用すること。[汚染等を防ぐため]
- 2) 使用後の脱脂綿を体内に遺残させないこと。[感染及び炎症等患者に健康被害を起こす危険があるため]
- 3) 本品は未滅菌品であるため、必要に応じて適宜高圧蒸気滅菌、EOG滅菌又は放射線滅菌して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び高温や火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 丸三産業株式会社

愛媛県大洲市徳森1349番地

TEL (0893) 25-1486