

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 (70903000)

フェザータッチホイール

【形状・構造及び原理等】

形態

- ・ホイール型 (H.P.用)
- ・円筒型 (H.P.用)

原理

ゴム基材部に混練させた砥粒により研磨を行う。

材質

- ・作業部 : 合成ゴム、研磨材

【使用目的又は効果】

義歯床用短期弾性裏装材等の修正、研磨に使用する。

【品目仕様等】

- ・作業部 : 砥粒粒度 : #320 以下

【使用方法等】


歯科技工用ハンドピースに装着し、指定した使用回転数で使用
する。

- ・指定使用回転数

形態	(回転数/分)
ホイール型	6,000 以下
円筒型	6,000 以下

[裏装時の修正、研磨]

- 1) 通法に従い、義歯床用短期弾性裏装材にて義歯床の補修を行
う。
- 2) 余剰部分をハサミなどでトリ
ミング後、形態修正・仕上げを
行う。
- 3) ポイント類の回転は、裏装材よ
り義歯床移行部に向かわせ、辺
縁の接着部分を剥がさない方向
とする。(使用回転数 : $\leq 6,000$
回転/分)。なお、研磨により
辺縁に部分的に剥離が生じた
場合には、辺縁処理材で補修
を行う。

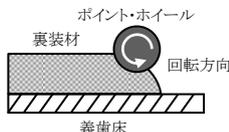

【使用上の注意】

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 本品は、マンドレルメーカーの指示に従って装着をし、装着
が確実なことを確認してから使用すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部が細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がった
りすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は
避けること。

[使用注意]

- 1) 表示使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れ
があるので、表示使用回転数を厳守すること。
- 2) マンドレルに損傷、変形（錆、表面キス、曲がり、汚染）等
のあるものは、使用しないこと。
- 3) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるた
め、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを
使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 4) 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがね
などを使用すること。
- 5) 本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には
使用しないこと。
- 6) 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

[重要な基本的注意]

本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったと
きは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くならな
い場所にて保管・管理すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・
管理すること。

【包装】

- ・40 コ入り
 - ・50 コ入り
- ※包装については予告なく変更する場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売元 : 株式会社マシントール中央
製造元 : 株式会社マシントール中央
住所 : 〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町 7-5
電話番号 : 0798-37-0270