


器 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
 一般医療機器 歯科用マンドレル（35170000）
ラージスリップレスマンドレル

【形状・構造及び原理等】

形状

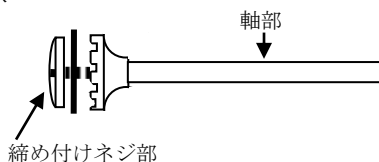

軸の規格：JIS T 5504 タイプ2
 ストレートハンドピース用軸

締め付けネジ（径）	全長
1.7 mm	44.5 mm

JIS T 5503 歯科用回転器具番号		
種類（マンドレル）	軸（HPタイプ2）	形状
300	104	614

構造

研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトで2つ以上の部品で構成される。

【使用目的又は効果】

研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するためのシャフトに用いる。

【使用方法等】

研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持し 歯科技工用ハンドピース等に装着し回転させ、作業部を被切削物、被研削物に接触させる。

【使用上の注意】

使用注意

- ① 目的外使用の禁止：【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。口腔内で使用しないこと。
- ② 二次加工の禁止：破損等の原因になるので、曲げ、切削打刻等（改造）は行わないこと。
- ③ 使用前・後の注意：使用前、使用後に点検を行い、汚染がある場合は除去すること。
- ④ 損傷、ひび割れ、変形（軸部のキズ、曲がり等）がある場合は使用を中止すること。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥ 本材及び切削粉の飛散に備え、保護カバー、集塵機等を使用して、周囲の安全を確保すること。
- ⑦ 取り付ける研削、研磨材の指定回転数を超えて使用しないこと。
- ⑧ 整備点検された歯科用、及び歯科技工用ハンドピース等のうち、回転数を指定回転数以下で安定して使用できるものを回転駆動装置として使用すること。
- ⑨ 使用する装置器械の製造業者（製造販売業者）の指定に従って、軸を、振れ、ガタつき、緩み等が無いように軸長の2/3以上確実にチャッキングさせること。
- ⑩ 予め人体に影響の無い場所で回転させて、安全を確認すること。
- ⑪ 本品は、歯科医療有資格者以外の人は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・湿気、腐食性薬剤及びその蒸気への暴露をさけること。
- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を避けて保管・管理すること。
- ・歯科医療従事者以外の人が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

- ・ 1本入り
- ・ 5本入り

※種類については、予告なく変更する場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元 株式会社マシンツール中央
 住所 〒663-8241 西宮市津門大塚町7-5
 電話番号：0798-37-0270
 F A X： 0798-37-0230
 W E B： <http://www.mt-chuo.jp>

製造元 株式会社マシンツール中央

発売元 株式会社トクヤマデンタル