

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(70907000)
(歯面研磨材 (70904000))

ジーシー セラシャインポリッシャー

【禁忌・禁止】

本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状 : ペースト

主成分 : ダイヤモンド、酸化アルミニウム、炭化けい素、ステアリン酸、マイクロワックス

原理 : ペーストをブラシ、フェルトまたはパフ等に付着させペーストに含まれるダイヤモンド砥粒等によりジルコニア、ガラスセラミックス、陶材等を研磨する。

【使用目的又は効果】

- 1) 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。
- 2) 粉末、ペースト、クリーム又はゲル状の半固形状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が清掃及び研磨に用いるものをいう。予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。生物学的効果を意図するもの、医薬品を含有するもの、生物由来原料を含むものを除く。

【使用方法等】

- 1) 形態修正、セラシャイン等を用いて中仕上げ後の最終艶出し研磨に使用します。
- 2) 本品はブラシ、フェルト等の歯科用研磨器具に適量つけて、各歯科用研磨器具の添付文書等に定められている回転速度(上限は 10,000 回転数/分以下)で仕上げ研磨を行います。
- 3) 研磨後の本品の付着物は、スチームクリーナーや超音波洗浄器等で洗浄し、全て除去します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品をブラシ、フェルトまたはパフ等に付着させる際に本品が飛び散る恐れがあるので、保護めがねを着用し、10,000 回転数/分以下で使用すること。(回転速度が低すぎると艶だしに時間がかかる場合があります。)
- 2) 回転数の許容範囲を超えて使用しないこと。
- 3) 使用後は速やかに本品を洗浄すること。
- 4) 必ず蓋を閉めて保管すること。
- 5) 他の研磨剤を使用したブラシ、フェルト、パフ等を使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - ①薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により、発疹等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした時はすぐに使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③本品を使用して研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

④本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。

⑤本品が万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

⑥本品を直接素手で触れないこと。また、皮膚に付着させたり、目や鼻等に入らないように注意すること。

⑦他の製品と混用しないこと。

⑧本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、高温・直射日光、火気を避け、冷暗所で保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社 マシンツール中央

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480