

歯科材料 9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 (70901000)

V-セラポイント

【形状・構造及び原理等】

形状

丸棒型



作業部径 : Φ 2.35
長さ : 50mm

種類 (色)	粗さ
ブラウン	Coarse (粗目)
ブルー	Medium (中目)
レッド	Fine (細目)

材質

アルミナ繊維、樹脂

【使用目的又は効果】

歯科用研削材で、歯科補綴物、模型等の研削、研磨に用いる。

【品目仕様等】

アルミナ等を用いる技工用研削材をいう。

【使用方法等】

本材をハンドピース、歯科技工用回転機器及び歯科用駆動装置に装着し、回転させる。作業部を被研削・研磨物に接触させ、研削・研磨を行う。
(最高許容回転数 : 30,000 r.p.m.)

【使用方法に関連する使用上の注意】

1) ハンドピースメーカー等の指示に従い、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認してから使用すること。

2) 使用前に予備回転 (中・低速回転) を行い、振れがないことを確認すること。

3) 過度の加圧、無理な角度で使用すると折れたり曲がったりすることがあるので、当該条件を避けること。

4) 最高許容回転数を超過して使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

①作業部に損傷、変形 (表面キズ、曲がり、汚染) 等のあるものは使用しないこと。

②【操作方法又は使用方法等】に記載の回転数を超過して使用しないこと

③歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

①本材を使用する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

②目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

・湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧 (物理的負荷) 及びその汚染を受けないように保管すること。

・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

1 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 : 株式会社マシントール中央

住所 : 〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町 7-5

電話番号 : 0798-37-0270