


歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 (70903000)

## ジーシー リラインⅡ形態修正用ポイント

### 【形状・構造及び原理等】

形態

- ・砲弾型（H.P. 用）

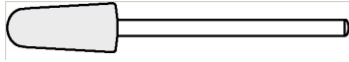

原理

- ・ゴム基材部に混練させた砥粒により研磨を行う。

材質

- ・軸部及び基材部：鋼（ニッケル鍍金）
- ・作業部：合成ゴム、研磨材

### 【使用目的、効能又は効果】

義歯床用長期弾性裏装材等の修正，研磨に使用する。

### 【品目仕様等】

- ・軸部：2.34mmφ JIS T 5504 軸部形式 2（H.P. 用）
- ・作業部：砥粒粒度：#80 以下

### 【操作方法又は使用方法等】

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、指定した使用回転数で使します。


- ・指定使用回転数

| 形態  | （回転数/分）   |
|-----|-----------|
| 砲弾型 | 20,000 以下 |

本品は、義歯床用長期弾性裏装材（ジーシー リラインⅡ）専用の形態修正用ポイントです。義歯床の裏装方法の詳細については、義歯床用長期弾性裏装材（ジーシー リラインⅡ）の添付文書を参照してください。

1）裏装時の修正，研磨

通法に従い、義歯床用長期弾性裏装材（例：ジーシー リラインⅡ）にて義歯床の補修を行います。余剰部分をハサミなどでトリミング後、本品や別売の仕上げ用ホイールなどにて形態修正・仕上げを行います。ポイント類の回転は、裏装材より義歯床移行部に向かわせ、辺縁の接着部分を剥がさない方向とします。

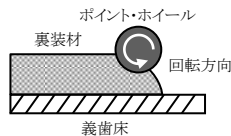

（使用回転数：形態修正用ポイント ≤20,000 回転/分、仕上げ用ホイール ≤6,000 回転/分）。なお、研磨により辺縁に部分的に剥離が生じた場合には、辺縁処理材で補修します。

2）術後の修正や補修

術後経過により裏装面の修正を行う場合には、修正部位を本品で削除し、水洗乾燥した後、追加裏装を行います。修正部に義歯床面が露出している場合には、その部分を一層削除して新鮮面を出し、露出している面にのみプライマー（レジン用）を塗布後、裏装材を盛り上げます。また、裏装面を剥がす場合には、ジーシー リラインⅡリムーバー（レジン用）を用いて裏装材を剥離させ、再度通法に従い裏装を行います。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1）本品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認してから使用すること。
- 2）使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3）無理な角度、過度の加圧での使用は、折れたり曲がったりすることがあるので避けること。

### 【使用上の注意】

1）使用注意

- ①表示使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、表示使用回転数を厳守すること。
- ②シャンクに損傷、変形（錆、表面傷、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- ③本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ④本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- ⑤塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わないこと。また、その他の消毒薬で長時間浸漬する場合は錆びる恐れがあるので、防錆剤を添加すること。
- ⑥本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2）重要な基本的注意

- ①本品により切削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理すること。
- ・本品は、錆びるおそれがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

1 函 3 本入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元：株式会社マシンツール中央  
住所：〒663-0047  
兵庫県西宮市津門大塚町 7-5

発売元：株式会社ジーシー  
住所：〒113-0033  
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 1 4 号  
電話番号：（お客様窓口）0120-416480