

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

ジーシー リラインⅡ仕上げ用ホイール

【形状・構造及び原理等】

形態

- ・ホイール型（H. P. 用）

原理

不織布基材部に附着させた砥粒により研磨を行う。

材質

- ・作業部：不織布（シリコンコーティング）、研磨材

【使用目的、効能又は効果】

義歯床用長期弾性裏装材等の修正、研磨に使用する。

【品目仕様等】

- ・作業部：砥粒粒度：#24 以下

【操作方法又は使用方法等】

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、指定した使用回転数で使します。


- ・指定使用回転数

形態	（回転数/分）
ホイール型	6,000 以下

本品は義歯床用長期弾性裏装材（ジーシー リラインⅡ）専用の形態修正用ポイントです。裏装方法の詳細については、義歯床用長期弾性裏装材（ジーシー リラインⅡ）の添付文書を参照してください。

1）裏装時の修正，研磨

通法に従い、義歯床用長期弾性裏装材（例；ジーシー リラインⅡ）にて義歯床の補修を行ないます。余剰部分をハサミなどでトリミング後、別売の形態修正用ポイントや本品などにて形態修正・仕上げを行います。ポイント類の回転は、裏装材より義歯床移行部に向かわせ、辺縁の接着部分を剥がさない方向とします。（使用回転数：形態修正用ポイント $\leq$ 20,000 回転/分、仕上げ用ホイール $\leq$ 6,000 回転/分）。なお、研磨により辺縁に部分的に剥離が生じた場合には、辺縁処理材で補修します。

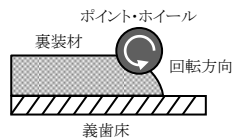

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1）本品は、マンドレルメーカーの指示に従って、装着をし、装着が確実なことを確認してから使用すること。
- 2）使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3）無理な角度、過度の加圧での使用は、折れたり曲がったりすることがあるので避けること。

【使用上の注意】

1）使用注意

- ①表示使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、表示使用回転数を厳守すること。
- ②マンドレルに損傷、変形（錆、表面キス、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- ③本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ④本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2）重要な基本的注意

- ①本品により切削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・本品は、汚染を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1 箱 12 枚入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元：株式会社マシンツール中央
住所：〒663-0047
兵庫県西宮市津門大塚町 7-5

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 1 4 号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480