

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(34811000)

Formlabs 模型用レジン(フォームラブス 模型用レジン)

【禁忌・禁止】

本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状： カートリッジ（粘ちゅうな液体）

原理： 光により硬化する性質を利用し、3Dプリンターで造形する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用の樹脂模型を作製するための材料である。

【使用方法等】

詳しい使用方法是各マニュアルを参照してください。

- 1) 本品の容器をよく振ってから、3D プリンター本体にセットします。
- 2) 取扱説明書に従い、造形を行い、造形完了後に取り出す。
- 3) 造形物表面の未硬化部分を取り除くために、造形物を IPA（イソプロピルアルコール）で規定の時間洗浄します。もし、未硬化部分を完全にに取り除けていない場合は、短時間 IPA（イソプロピルアルコール）で追加洗浄します。
- 4) 洗浄後、乾燥します。
- 5) Form Cure を用いて造形物を二次重合します。
- 6) サポート部分を取り除き、必要に応じて形態修正等を行います。

【使用上の注意】

- 1) 使用方法等に関連する使用上の注意
 - ①本品を使用する際には手袋（ニトリルグローブ等）及び保護メガネ等を着用し、皮膚に付着させたり、目に入らないようにすること。
 - ②本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
 - ③本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
 - ④本品を使用する場所は換気を行うこと。
 - ⑤本品を他の製品と混用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
 - ②本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
 - ③本品が皮膚に付着した場合には、すぐに石けんと水で洗い流すこと。
 - ④本品が万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温・直射日光、火気を避け、室温（5～35℃）で保管すること。
- ・暗所で保管すること。
- ・湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避ける。
- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。
- ・

【有効期間】

本材容器の使用期限までに使用すること。

【包装】

- ・Precision Model Resin（プレジジョンモデルレジン） 1L / カートリッジ
- ・Grey Resin（グレーレジン） 1L / カートリッジ
- ・White Resin（ホワイトレジン） 1L / カートリッジ
- ・Clear Resin（クリアレジン） 1L / カートリッジ
- ・Fast Model Resin（ファストモデルレジン） 1L / カートリッジ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元・製造元：株式会社 マシンツール中央

住所：〒663-8241

兵庫県西宮市津門大塚町 7-5

総販売元：株式会社 YOKOITO

住所：〒600-8357

京都府京都市下京区柿本町 588-22

問い合わせ電話番号：075-354-6424

メールアドレス：dental_sales@yokoitokyoto.com

ホームページ：https://www.dental.form2.shop