

## ノンラテックス スクリュータイププロフィーカップ

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

柄部:真鍮  
カップ部:合成ゴム

#### 〔形状・構造等〕

種類:#101-S #101-B #102-A #102-P #104-N  
#105-B #105-L #106-P #107-SG #108-SG

下記外観写真の通り。



#101-A



#104-N



#105-B



#102-P



#107-SG



#108-SG

#### 〔原理〕

歯科用スクリュータイプ電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

歯面清掃及び歯面研磨。

### 【使用方法等】

- 1) 歯科用電気エンジン、スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピース等に装着する。
- 2) 試運転し確実に装着されている事を確認する。
- 3) 研磨ペーストをカップに適量塗布し、歯面研磨を行う。\*5000rpm以下厳守。

### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - ・本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
  - ・術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
  - ・回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用しないこと。
2. その他の注意
  - ・本品を表記以外の用途に使用しないこと。
  - ・本品を使用するにあたっては、患者の症例に適合する事を歯科医師が判断する。
3. 家庭用洗剤の使用注意
  - ・家庭用洗剤は、金属を腐食させる事があるので注意する事。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を薦める。
4. 機能水の使用禁止
  - ・超機能水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
5. 洗浄、消毒、滅菌上の注意
  - ・次亜鉛素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
  - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼすことがある。
  - ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。

### 6. 磨き粉、金属ウール・金属ブラシの使用禁止

- ・腐食(錆び)の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

### 7. 保管上の注意

- ・「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆ている器具類とは一緒に保管しないこと。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

カップを再使用する際は、清掃液・消毒剤を用いて、付着物を洗浄除去した後、EOGによる消毒をする事。(オートクレーブ、ケミクレーブ又は乾熱滅菌は避ける事。)なお、塩素系薬剤は使用しない事。また、清掃液・滅菌器については、各製造業者の指示に従って正しく使用する事。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社マイクロテック  
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9  
Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381  
製造業者:AllPro, Inc., (U.S.A.)