

2016年10月6日改訂（第5版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000051

2015年5月20日改訂（第4版）

歯科材料 09 医療用研削材料

2009年12月7日改訂（第3版）

一般医療機器

歯科技工用アブレイブ研削器具

70901000

## デュラシンディスク

### 【形状・構造及び原理等】

[概要]酸化アルミニウム製研削用ディスク。

[形状・構造等]

酸化アルミニウムアブレイブを使用した円形薄型ディスク。



[原理]

本品をマンドレルに装着し、回転させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

陶材焼付用金属の切削と仕上げに使用する酸化アルミニウム研削材。

### 【使用方法】

- 1) 本品を歯科用マンドレルに緩みのないように装着する。
- 2) 本品の装着されたマンドレルを歯科用電気駆動装置に装着し、ぶれが無い事を確認する。
- 3) ぶれが無ければ、本品の縁部を軽く金属に当て、研削する。

\*10,000－12,000rpm の範囲内での使用厳守。

### 【使用上の注意】

- ・ 本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・ 術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・ 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

### 【取り扱い上の注意】

- ・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

[使用前・使用後の点検]

使用前・使用後は破損、ヒビ等がないか確認すること。  
これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel: 03-5827-1380 Fax: 03-5827-1381

製造業者：Keystone INDUSTRIES. (U.S.A.)