

2016年9月20日改訂(第5版)新記載要領に基づく改訂
2015年5月20日改訂(第4版)
2009年12月7日改訂(第3版)

届出番号:13B1X10089000074

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

キーワックス

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体:マイクロクリスタルラインワックス 100%

〔形状・構造等〕



コイル巻ブルーワックス(225g)

円形のワックスがロール状に巻かれたもの。

種類:円形—6ゲージ(4mm径)、12ゲージ(2mm径)

溶解点:約75°C~78°C

〔原理〕

ロストワックス法により、ろう型を製作する。

【使用目的又は効果】

スプルーやバー、クラスプ等を鑄造する時に使用するワックス。

【使用方法等】

- 1) 使用する適切な径を選択し、使用する長さにカットする。
- 2) 各種クラスプ、バー及び床の付線用ろう型の製作や、スプルー製、バント等に使用する。
- 3) 微湯温及び弱火を加える事により軟化しやすくなり、複雑な形状のものでも製作可能。

【使用上の注意】

1. 本体は可燃性であるので使用の際火傷しないように注意すること。
2. 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、直ちに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

冷暗所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は、破損、キズ等がないか確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381

製造業者: Keystone Industries (U.S.A.)