

2016 年 9 月 2 日改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000119

2015 年 5 月 1 日改訂（第 4 版） 歯科材料 9 歯科用研削材料

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版） 一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

エナメライズポリッシングペースト

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

成分：ベジタブルオイル 7 %
グリセリン 8 %
セチルステアリンアルコール 8 %
酸化アルミニウム 30 %
(3 ミクロン)

〔形状・構造等〕

チューブタイプ：36 g



シリンジタイプ：3 g



〔原理〕

本品をブラシやバフに塗布し、研磨される事で艶を出す。

【使用目的又は効果】

歯科用ポーセレン・ハイブリットレジン・コンポジットレジン・レジン・金属等の補綴物、充填修復物表面等の艶出し研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 中研磨・仕上げ研磨の過程で、表面の傷等を取り除き滑沢に仕上げておく。
- 2) 本材をフェルトポイントやバフに塗布させる。
- 3) バフ等を回転させて、ポーセレン等の表面に光沢が出るまで、発熱に注意しながら丁寧に研磨を行う。
- 4) 最後に本材が付着していないフェルトポイントやバフを用い、ポーセレン等の表面を軽く研磨すると、より一層光沢が得られる。

【使用上の注意】

1. 本材の研削・研磨の際は、目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡などを使用すること。
2. 使用後は、蓋をすぐに閉めること。
3. 本材の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、直ちに医師の診断を受けること。
4. 成分に毒性はないが、飲み込んだりしないように十分注意すること。

5. 目鼻耳等に入らないように注意すること。

万が一そのような場合が起こった場合、水洗いで応急処置後、直ちに医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

冷暗所で保管すること。

歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

有効期限：本体に明記されている有効期限内での使用を厳守する事。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は、破損、キズ等がないか確認すること。

これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Cosmedent Inc. (U.S.A.)