

2017 年 3 月 10 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000126

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版） 歯科材料 09 歯科用研削材料

2008 年 8 月 14 日改訂（第 2 版） 一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

ペーパーブラスセンターディスク

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

素材：

センター部（全種）：真鍮製

ガーネット：ガーネット粒子付紙ディスク

（用途：アクリル・ゴールド用）

サンド：酸化アルミニウム粒子付紙ディスク

（用途：アクリル・ゴールド・アマルガム用）

エメリー：シリコンカーバイド粒子付紙ディスク

（用途：エナメル・ポーセレン・ノンプレシヤス・メタル
スプ

レーの切断用）

〔形状・構造等〕

外観写真



種類：

3/4 ガーネット X777

5/8 ガーネット ミディアム、X777

3/4 サンド X777

5/8 サンド ミディアム、X777

〔原理〕

本品を歯科用ラッチタイプマンドレルに装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

レジン・金属・陶材等の補綴物の研削に用いる研削材。

【使用方法】

- 1) 使用する前に、本品に形状異常等がないか確認する。
 - 2) 本品を専用マンドレルに装着し、確実に装着されているかどうか確認してから、歯科用電気駆動装置に装着し口腔外で試運転を行う。
 - 3) 回転に振れ等がなければ、本品表面を作業部にあて、方向に注意しながら研磨する。（裏面は台紙になっており、使用不可）
 - 4) 回転速度に注意しながら作業すること。
- * 使用回転数：30,000rpm 以下厳守。

【使用上の注意】

1. 保護眼鏡を使用時に着用する。
2. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

滅菌不可

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：E. C. Moore Company, Inc. (U. S. A.)