

2016 年 9 月 26 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）
2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版） 機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
2008 年 8 月 14 日改訂（第 2 版） 一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

届出番号:13B1X10089000128

ラッチタイプマンドレル

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：ステンレススチール

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：ハンドピース用・コントラ用



BC-7 HP、BC-3 RA、BC-4 FG、BC-2 RA、
BC-7 HP-M、BC-2 RA-M、2 HP

〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

ラッチタイプの切削用ディスクやホイールを取り付ける回転軸で技工用のものを言う。

【使用方法】

- 1) 必要に応じ、使用前に滅菌する。
(オートクレーブ滅菌可。135℃以下)
- 2) 専用ディスクの表裏を確認し、ディスク中央の穴を本品頭部に押しつけ、かませる。
- 3) 確実に装着された事を確認し、本品を歯科用電気駆動装置に装着し、試運転する。
- 4) 振れ等がなければ、装着したディスク等で研削を開始する。

*使用回転範囲を越えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用すると、破損や折れの原因になるので注意すること。

*使用回転数：30,000rpm 以下厳守。

*装着したディスク等の回転範囲が 30,000rpm 以下の場合、ディスクの使用回転数を厳守。

【使用上の注意】

1. ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
2. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
3. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす事がある。

4. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。
5. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：E. C. Moore Company, Inc. (U. S. A.)