

## 3D ブレードホルダー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【概要】

本体：ステンレススチール

#### 【形状・構造等】

曲げ幅約 90°（片側は約 45°）で、どの方向にもブレードが向けられるステンレススチール製ブレードホルダー

種類：ユニヴァーサルタイプ、ストレートタイプ



#### 【原理】

ブレードを先端部に装着し使用する。

### 【使用目的又は効果】

組織の切断又は切離が可能なブレードを取り付けて使用する。

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みであることを確認する。
- 2) ブレードの装着方向を確認し、ストレートタイプは装着部にスライドさせ確実に装着する。  
ユニヴァーサルタイプはヘッド先端部のネジを緩め、ブレードを装着部に挿入し、ネジを確実に締め装着する。
- 3) ホルダー後方のネジ部を緩め、ヘッドの位置を決めてからネジを逆方向に締め付けヘッドを固定する。  
固定が不安定な場合、ネジ部の穴にレンチ等を挿入し再度締める。  
ブレード・ヘッド・ホルダー部がしっかり固定されている事を確認した上で使用する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用前の清掃について

使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。

#### 2. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

#### 3. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。

#### 4. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

#### 5. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。

- ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。（温度：135℃以下厳守）

- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。  
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

#### 6. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

#### 7. 保管上の注意。

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。  
又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

### 【取り扱い上の注意】

- ・ブレードを装着・脱着する際、人体に刺さらないように十分に注意すること。（保護手袋を必ず着用して下さい）
- ・ブレードヘッド部を固定する際、装着されているブレードには十分注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Helmut Zepf Medizintechnik GmbH (Germany)