

2016年9月2日改訂（第4版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000153

2009年12月7日改訂（第3版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

2008年8月14日改訂（第2版）

一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## ミニフレクシバフ

### 【形状・構造及び原理等】


#### 〔概要〕

本体：フェルト

#### 〔形状・構造等〕

円形状のフェルトバフ。

種類：3/8、1/2、5/8

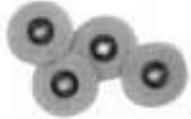

#### 〔原理〕

本品を専用マンドレルに装着し、歯科用電気駆動装置で回転させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

歯科用電気駆動装置のマンドレルに装着し補綴物整形・研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 本品をバフ側を上にして（セロハン側を下）、専用マンドレルに装着する。
- 2) マンドレルに装着された本品を歯科用電気エンジン又は、マイクロモーターに装着し試運転する。
- 2) ぶれ等がないことを確認し、補綴物を研磨する。  
\*30,000rpm 以下での使用を推奨致す。

### 【使用上の注意】

- ・本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

滅菌・オートクレーブ不可

### 【取り扱い上の注意】

- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：COSMEDENT Inc., (U. S. A.)