

2016 年 4 月 11 日改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000154

2013 年 12 月 7 日改訂（第 4 版） 歯科材料 09 歯科用研削材料

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版） 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

フレクシポイント

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：シリコンゴム

〔形状・構造等〕

種類： カップ：細（ブルー）・極細（ピンク）

ポイント：細（ブルー）・極細（ピンク）



カップ ポイント カップ ポイント
細 細 極細 極細

〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着して回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

歯科用電気駆動装置に装着し補綴物整形・研磨に用いるシリコンポイント。

【使用方法等】

- 1) 使用する本品を選択する。
- 2) 本品を歯科用電気エンジン又は、マイクロモーターに装着し、試運転をする。
- 3) ぶれ等がないことを確認してから補綴物を研磨する。
*30,000rpm 以下での使用を推奨。

【使用上の注意】

- ・本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
- ・本品を表記以外の用途に使用しないこと。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌温度：

121℃以下 *乾燥工程不可

【取り扱い上の注意】

- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Cosmedent Inc. (U.S.A.)