

2017 年 1 月 17 日改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂）

2014 年 4 月 17 日改訂（第 4 版） 機械器具 64 歯科用探針

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版） 一般医療機器 歯周ポケットプローブ 31848000

届出番号:13B1X10089000214

イージービュープローブ

【形状・構造及び原理等】


〔概要〕

本体：硬質レジン

〔形状・構造等〕

片頭硬質レジン製歯科用探針。

種類：3 種類

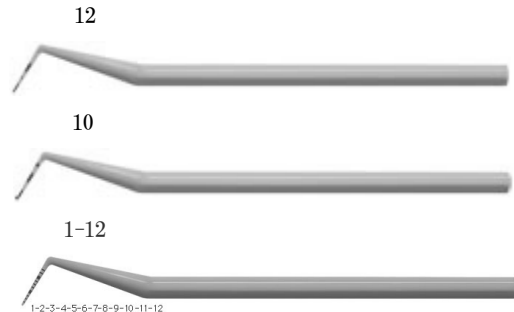

〔原理〕

一定の力で本体先端を歯周ポケットに入れることによって、歯周ポケットの深さを測定できる。

【使用目的又は効果】

歯冠修復物・充填物の歯質との密着状態の検査、付着歯石の発見等に使用するプローブ。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に、滅菌済みであることを確認する。
(オートクレープ滅菌可。121℃以下厳守)
- 2) 本品を一定の力で本体先端を歯周ポケットに挿入し、深さを測定する。

*インプラントに使用可能。

【使用上の注意】

1. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレープ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。（オートクレープ温度121℃以下）。
- ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は、劣化の原因になるため使用しないこと。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、他の器具をさせない様、十分乾燥させてから保管すること。

2. 保管上の注意。

化学製品と一緒に収納・保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：PARADISE DENTAL TECHNOLOGIES, Inc. (U.S.A.)