

## マイクロルーペ

### 【禁忌・禁止】

眼に重篤なダメージを与える可能性があるため、本機器を通して太陽・光照射器・レーザー光線・高輝度照明等を直視しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

レンズレスフレーム、ゴーグルタイプ：プラスチック  
ルーペレンズ：光学レンズ  
レンズ側面：ABS プラスチック

#### 〔形状・構造等〕

種類：ゴーグルタイプ 2.5倍  
レンズレスタイプ 2.5倍  
作業距離：約 420 mm



ゴーグルタイプ



レンズレスタイプ

#### 〔原理〕


装着されているレンズから覗く事により、作業視野の拡大像が得られる。

### 【使用目的又は効果】

作業野の拡大像を得る為に使用する。

### 【使用方法等】

- 1) 本品装着後、ストラップで頭部に緩みがないようしっかり固定する。
- 2) 本体上部中心にある調節ノブを回し、瞳孔間距離を調整する。(左右調節ノブは回さないこと。)

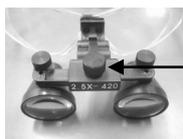

調整ノブ

- 3) 拡大像を観察する。

### 【使用上の注意】

- 1) 浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- 2) 掛け外しは必ず両手でツル部分を持つこと。

- 3) 高い場所から落下させたり、ぶつけたりしないこと。
- 4) かゆみ、かぶれ、湿疹などの症状が発生した場合は、本品の使用を止め、医師の診断を受けること。
- 5) フレーム、鼻パッド等の消耗品は経年変化により素材が劣化するため、必要に応じて交換すること。
- 6) 経時変化や使用方法等により、ネジの緩みや脱落、フレーム破断等の故障・損傷が発生した際は、自分で修理・接着等を行わず、販売店に連絡すること。
- 7) 本品は改造しないこと。

### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用しない時は専用のケースに入れて保管すること。
- 2) 落下するような場所へ保管しないこと。
- 3) 清掃は、乾いた布で拭くこと。水分やアルコールを多く含んだ布を用いることも避ける。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

破損、ヒビ、汚染等がないか、点検・確認を行い、該当する場合は使用を中止すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック  
〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号  
Tel：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381  
製造業者：

NORTH(NANJING)INSTRUMENT TECHNOLOGY INDUSTRIES GROUP  
(China)