

2017 年 3 月 11 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000295

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版） 機械器具 09 歯科用研削材料

2008 年 8 月 14 日改訂（第 2 版） 一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

ブラウンポイント HP

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

シャンク部：ステンレススチール

作業部：炭化ケイ素

〔形状・構造等〕

種類：ハンドピース用

No. 2、28、13、44、20、11

〔原理〕

歯科用ハンドピースに装着し回転させる事で研削できる。

【使用目的又は効果】

歯科用硬質合金、特にコバルトクロム合金、ニッケルクロム合金等の研削に使用する。

【使用方法】

- 1) 歯科用ハンドピースにシャンクを確実に挿入する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

使用回転数：5000-30000rpm

- * 使用回転数は明記してある速度を厳守すること。
- * 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
また、吸塵器を併用する事。
2. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
3. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
4. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：SUNIL CERAMIC IND. CO. (Korea)