

2017年3月15日改訂（第5版 新記載要領に基づく改訂）

2015年12月10日改訂（第4版）

2009年12月7日改訂（第3版）

機械器具 9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

届出番号:13B1X10089000299

ロトブロックスミニ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具。

軸部：ステンレススチール製


ブラシ部：ナイロン製

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り。

形状2種類：フラット・テーパー

下記外観写真参照

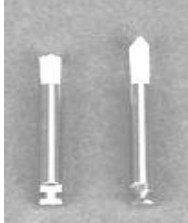

〔原理〕

歯科用コントラアングルに装着し回転させ

歯面にあてて事で清掃、研磨ができる。

【使用目的又は効果】

咬合面・矯正ブラケット部・歯頸部等の研磨及び歯面清掃に使用する。

【使用方法等】

1) 使用前に滅菌済みかであることを確認する。

（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守）

2) 本品を歯科用コントラアングルに装着し、試運転し、振れ等がない事を確認する。

3) 使用回転数を厳守し、補綴物及び歯面研磨を行う。

* 使用回転数：5,000rpm

* 研磨ペースト等を併用して研磨する事も可能。

【使用上の注意】

重要な基本的注意事項

- 1) 本製品使用による目の損傷を防ぐ為、術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用する事。
- 2) 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用を中止する事。
- 3) 本品使用の際、ハンドピースのメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでない事を確認する事。
- 4) 本品を使用する際、折れたり曲がったりする恐れがあるので、無理な角度や過度な加圧での使用は避ける事。
- 5) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。
- 6) 溶解や破折の原因となるので、過度のヒートिंगをしない事。
- 7) 超機能水（超酸性水）等は、金属（マンドレル部）を腐食させる事があるので使用しない事。
- 8) 洗浄・消毒・滅菌上の注意：
 - 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
 - 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼす事がある。
 - 洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用する事。
 - 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質又は変色する事がある。

● 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

9) 磨き粉、金属ウール・金属ブラシの使用禁止

シャンク部の腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しない事。

10) 保管上の注意

マンドレル部の「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具類とは一緒に保管しない事。又、化学薬品と一緒に収納・保管しない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Hager & Werken GmbH & Co. KG (Germany)