

2016年10月16日改訂(第4版 新記載要領に基づく改訂)

届出番号: 13B1X10089000336

2009年12月7日改訂(第3版)

歯科材料 09 歯科用研削材料

2008年7月7日改訂(第2版)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

ポリソフトシリンダー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体: シリコンカーバイド・ポリウレタン

〔形状・構造等〕

サイズ: $\phi 7 \times 24 \text{mm}$

外観写真



〔原理〕

歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

貴金属等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 歯科用電気駆動装置に装着し試運転する。
- 2) 振れ等が無ければ、補綴物に軽くあてながら研磨する。(強く押し当てて使用すると、破折等が起こる可能性がある。)

* 使用回転数: 15,000rpm 以下

【使用上の注意】

- ・ 術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・ 回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
- ・ 研磨時の研磨熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・ 指定の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- ・ 変形、亀裂、損傷等のあるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

滅菌不可。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel: 03-5827-1380 Fax: 03-5827-1381

製造業者: Renfert GmbH (Germany)