

2017 年 2 月 9 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000369

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

2008 年 11 月 19 日改訂（第 2 版）

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

シリコンポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕


本体：シリコンカーバイド製（炭化ケイ素）
及びステンレススチール

〔形状・構造等〕

種類：P0500、P0501、P0524：15000rpm
P0023：15000rpm
P0205：15000rpm
P11001、P11002、P1102、P1105、P1100：20000rpm

m

P11003、P1103：15000rpm
P0301、P0315、P0310、：15000rpm
P0306、P0316、P0320：10000rpm
P0264、：15000rpm
P0634：15000rpm
P0644:10000rpm
P0667、P0664：10000rpm
P0001、P0005、：15000rpm
P0400、P0401、P0424：20000rpm
P0533、P0033、P0133、P0733：5000-7000rpm
P0362、P0365:5000rpm
P0352、P0355：10000rpm

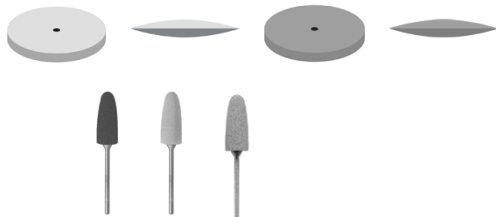

〔原理〕

本品をマンドレルに取付、歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

コンポジット及び金属の咬合面などの研削に使用する。

【使用方法】

- 1) 本品を専用マンドレルに装着し、歯科用電気駆動装置にマンドレルを奥まで確実に挿入する。
 - 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。
- ＊ 使用回転数は明記してある速度を厳守すること。
＊ 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器を併用する事。
2. 柄部ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
4. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。

5. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。
6. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：NTI-Kahla GmbH (Germany)