

2016 年 6 月 3 日改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000370

2015 年 5 月 22 日改訂（第 4 版）

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版）

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

NTI マンドレル

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するステンレス製シャフト。

〔形状・構造等〕

種類：M013、M007、M004、M017、M025、M014、M029、M006、



〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

切削用のディスクやホイール、サンドペーパー等を保持する。

【使用方法】

- 1) 本品に研削用ディスク等が緩みのないように装着されている事を確認した上で、歯科用電気駆動装置に装着し試運転する。
- 2) 振れ等がないことを確認し本品を使用する。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器を併用する事。
2. ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 家庭用洗剤の使用注意
家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので注意する事。
4. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
5. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
6. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。
7. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。
*装着したディスク等の使用回転数を厳守する。
*使用回転範囲を越えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用すると、破損や折れの原因になるので注意する。
*限度を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：NTI-Kahla GmbH (Germany)