

2017年3月改訂（第7版 新記載要領に基づく改訂）

2015年6月改訂（第6版）

2014年6月改訂（第5版）

届出番号:13B1X10089000395

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 70744000

サクラ カーバイドバーHP

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

ヘッド：タングステンカーバイド製

シャンク部：ステンレススチール製

〔形状・構造等〕

種類：#1/4、1/2、1、2、3、4、5、6、7、8、10、699、
700、701、702、703、699L、700L、701L、702L、703L、
1169、1170、1171、



推奨回転数：30,000rpm 以下

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Rodent AG (Switzerland)

Swiss Dental Export GmbH (Switzerland)

販売元：吉野石膏販売株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨 1-8-3

TEL:03-3944-6571 FAX:03-3944-6577

〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

金属、レジン、セラミック又は同種の材料を研削するために用いる切削器具。

【使用方法】

1) 使用する前に、本品が滅菌済みであることを確認する。

（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）

2) 本品を歯科用電気駆動装置に装着する。

3) 本品が確実に装着されていることを確認し、口腔外で試運転する。

4) 振れ等がなければ、研削する。

* 限度を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する事。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。

吸塵器を併用する事。

2. ステンレススチールは鉄に比べて錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。

3. 機能水の使用禁止

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。

4. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。

5. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。

6. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。