

## ハマハー エキスカベーター

### 【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 本体：ステンレススチール

〔形状・構造等〕 全 8 種類

種類・外観写真：

エキスカベーター マイクロラウンド HWG020-00



エキスカベーター HWG030-00



エキスカベーター・ダービーペリー HWG010-00



エキスカベーター・ダービーペリー HWG011-00



エキスカベーター・ダービーペリー HWG012-00



エキスカベーターダブルエンド HWG031-00



エキスカベーターダブルエンド HWG033-00



エキスカベーターダブルエンドミディアム HWG032-00



### 〔原理〕

カーブの付いた先端部を用い、窩洞形成・軟化象牙質の除去を行う。

### 【使用目的又は効果】

う歯の齲蝕象牙質の切断及び除去のために用いる

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に、滅菌済みかどうか確認する。  
(オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守)
- 2) 齲蝕象牙質の切削及び除去を行う。

### 【使用上の注意】

#### 1. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

#### 2. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。（オートクレーブ温度 135℃以下）。

- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
- 水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

#### 3. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

#### 4. 保管上の注意。

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししない事。
- ・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌可。（135℃以下厳守）

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Karl Hammacher GmbH (Germany)