

2016 年 5 月 16 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

2009 年 12 月 7 日改訂（第 2 版）

2008 年 7 月 25 日作成（第 1 版）

機械器具 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

届出番号:13B1X10089000428

ナイロンディスク


【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：ナイロン

〔形状・構造等〕

種類：コース・ミディアム・ファイン・エクストラファイン

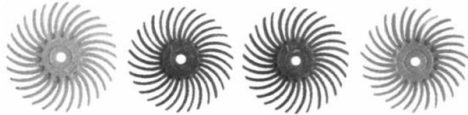

〔原理〕

歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

アマルガム合金・金合金・パラジウム合金・銀合金等の研削に使用する。

【使用方法】

- 1) 本品を専用マンドレルに装着する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

使用回転数：10,000rpm 以下厳守

- * 使用回転数を厳守する事。
- * 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する事。

【使用上の注意】

使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。

吸塵器の併用を勧める。

【取り扱い上の注意】

- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

オートクレーブ及びケミクレーブ滅菌不可。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Rodent AG (Switzerland)