

サクラ ミラートップ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

柄部：ステンレススチール

作業部：ガラス鏡

〔形状・構造等〕

種類：No.4

下記外観写真の通り。



〔原理〕

ミラーホルダーに本品を装着し口腔内を観察する。

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 【保守・点検に係る事項】に従い、使用前は洗浄・滅菌を行うこと。
2. ミラーホルダーへ装着する。
3. 口腔内を観察・検査する。

【使用上の注意】

1. 本品は【使用目的又は効果】に記載する用途以外に使用しないこと。
2. 高温の乾燥は、変質または変色、劣化、破損等のおそれがあるため行わないこと。
3. 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるため、速やかに清拭すること。
4. 磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。
5. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌を行うこと。
6. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしないこと。
7. 超音波洗浄機は、鏡面の傷やくもりの原因となるため、使用しないこと。
8. 腐食（錆）の原因となるため、次亜塩素酸ナトリウム、ホルマリン、フェノール、ポビドンヨード、グルコン酸クロルヘキシジン、塩化ベンゼトニウム、塩化ベンザルコニウムは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 塵やほこり等が付かない清潔な場所に保管すること。
2. 化学薬品等と一緒に保管しないこと。
3. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は、汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。
2. 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
3. 水分が付着したまま放置すると、錆び、シミ等の原因となることがあるため、洗浄・滅菌後は、十分に乾燥させてから保管すること。
4. オートクレーブ滅菌器の庫内に水垢や汚れが付着していると、焼き付きが発生する恐れがあるため、滅菌器の添付文書または取扱説明書に従い、定期的な清掃を推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-00 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381

製造業者：Rite-Dent Manufacturing Company (Pakistan)

総発売元：吉野石膏販売株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1丁目8番3号

TEL:03-3944-6571 FAX:03-3944-6577