

2017 年 3 月 10 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000491

2016 年 4 月 19 日改訂（第 3 版）

2009 年 12 月 7 日改訂（第 2 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

再使用禁止

ノンラテックススクリュートタイプ プロフィーブラシ

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

ネジ部：真鍮
ブラシ部：ナイロン
基底部：合成ゴム

〔形状・構造等〕

2 種類：#110 #114
下記外観写真の通り



#110



#114

〔原理〕

歯科用電気エンジンに装着し回転させる事で
歯の清掃、研磨ができる。

【使用目的又は効果】

歯面清掃・研磨用ブラシ。

【使用方法等】

- 1) 歯科用電気エンジン、マイクロモーターまたは、スクリュートタイプのプロフィーコントラハンドピース等に装着する。
- 2) 研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。*12,000rpm 以下での使用推奨。

【使用上の注意】

1 重要な基本的注意

- ・ 本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・ 術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・ 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

2. その他の注意

- ・ 本品を表記以外の用途に使用しないこと。
- ・ 本品を使用するにあたっては、患者の症例に適合するかどうかを歯科医師が判断する事。

3. 家庭用洗剤の使用注意

- ・ 家庭用洗剤は、金属を腐食させる事があるので注意する事。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を薦める。

4 機能水の使用禁止

- ・ 超機能水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。

5. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・ 次亜鉛素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
- ・ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼすことがある。
- ・ 洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。

6 保管上の注意

- ・ 「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具類とは一緒に保管しないこと。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・ オートクレーブ滅菌不可
単回使用
(1 回の使用で破棄すること。廃棄方法は各自治体の指示に従うこと)

【取り扱い上の注意】

- ・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

- 使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、腐食等がないか確認すること。
- これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：AllPro ,Inc.(U.S.A)