

2017年3月10日改訂（第4版 新記載要領に基づく改訂）  
2016年4月19日改訂（第3版）  
2009年12月7日改訂（第2版）

届出番号：13B1X10089000492

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

再使用禁止

## ディスポーザブルプロフィーブラシ スクリュータイプ

### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

[概要]

柄部：真鍮

ブラシ部：ナイロン

[形状・構造等]

下記外観写真の通り

#211



#215



[原理]

歯科用電気エンジンに装着し回転させることで、  
歯の清掃、研磨ができる。

### 【使用目的又は効果】

歯面清掃・研磨用ブラシ。

### 【使用方法等】

- 1) 歯科用電気エンジン、マイクロモーターまたは、スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピース等に装着する。
- 2) 研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。 \*12,000rpm 以下での使用推奨。

### 【使用上の注意】

- 1 重要な基本的注意
  - ・ 本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
  - ・ 術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
  - ・ 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
2. その他の注意
  - ・ 本品を表記以外の用途に使用しないこと。
  - ・ 本品を使用するにあたっては、患者の症例に適合するかどうかを歯科医師が判断する事。
3. 家庭用洗剤の使用注意
  - ・ 家庭用洗剤は、金属を腐食させる事があるので注意する事。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤の使用を薦める。
- 4 機能水の使用禁止
  - ・ 超機能水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
- 5 洗浄、消毒、滅菌上の注意
  - ・ 次亜鉛素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
  - ・ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼすことがある。
  - ・ 洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
- 6 保管上の注意
  - ・ 「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具類とは一緒に保管しないこと。

### [使用方法に関連する使用上の注意]

オートクレーブ滅菌不可

単回使用

（1回の使用で破棄すること。廃棄方法は関係省庁・自治体の指示に従うこと。）

### 【取り扱い上の注意】

・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

[使用前・使用後の点検]

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：AllPro, Inc.(U.S.A)