

\*2019年8月16日改訂(第5版)

2016年9月10日改訂(第4版 新記載要領に基づく改訂)

2015年8月25日改訂(第3版)

届出番号:13BX10095000496

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 31776000

## クレーブミラー

### 【形状・構造及び原理等】

#### [概要]

柄部:プラスチック

作業部:歯鏡用ガラス

#### [形状・構造等]

下記外観写真の通り。



#### [原理]

口腔内に本品を挿入し、歯及び口腔内粘膜等の状態を先端鏡に反射させ見る。

### 【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に、本品が滅菌済みであることを確認する。  
(オートクレーブ滅菌可。121℃以下厳守)
- 2) 本品作業部を口腔内に挿入する。
- 3) 口腔内を観察・検査する。

### 【使用上の注意】

- 1 歯鏡用ガラス使用。  
素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折する事がある。
- 2 洗浄、消毒、滅菌上の注意
  - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼす事がある。
  - ・使用後は、洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片をミラー面に傷が付かないように速やかに除去すること。
  - ・洗浄・消毒・滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
  - ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の滅菌温度に注意すること。
  - ・洗浄・消毒・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管する事。  
水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となる事がある。
- 4 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。  
ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前後にブラシ等でミラー表面を磨かないこと。使用前にミラー面が曇っている場合は、柔らかい布等で拭く事。
- 5 保管上の注意。  
本品の保管は、科学薬品等と一緒に保管しない事。  
また、破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具等と一緒に保管しない事。特に塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際は出来るだけ早めに洗浄すること。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。
- ・作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒートイングしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### [使用方法に関連する使用上の注意]

オートクレーブ滅菌可。(121℃以下厳守)  
但し、乾燥工程は不可

### 【保守・点検に係る事項】

#### [使用前・使用後の点検]

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

### 【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel: 03-5827-1380 Fax: 03-5827-1381

\*製造業者:

Ningbo Taili Electric Appliance Co., Ltd. (China)