

2019 年 11 月改訂（第 6 版）

届出番号：13B1X10089000497

2017 年 3 月改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂）

2014 年 6 月改訂（第 4 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

サクラ ミニロビンソンブラシ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

軸部：炭素鋼、ニッケルメッキ

ブラシ部：馬毛及びヤギ毛

〔形状・構造等〕

ブラシ部直径：11mm 軸部直径：2.35mm

全長：44mm



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381

製造業者：Shanghai ZhiZhong Brush Factory (china)

販売元：吉野石膏販売株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-8-3

TEL:03-3944-6571 FAX:03-3944-6577

〔原理〕

歯科用ハンドピースに装着し、回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

歯科用ハンドピースに装着し、補綴物研磨に用いるブラシ。

【使用方法等】

- 1) 歯科用ハンドピースに本品を装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 振れ等が無ければ、本品を補綴物に軽く押し当て、研磨する。

*12000rpm 以下での使用厳守

【使用上の注意】

- ・ 本製品は歯科用ハンドピースに取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・ 術者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・ 回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

【取り扱い上の注意】

- ・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。