

2017 年 3 月 15 日改訂（第 3 版）新記載要領に基づく改訂  
2009 年 12 月 7 日改訂（第 2 版）  
2009 年 8 月 3 日作成（第 1 版）

届出番号:13B1X10089000502

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## フェルトフレクシポイント

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

本体：フェルト

軸部：ステンレススチール

#### 〔形状・構造等〕

円錐状のフェルト製ポイント



#### 〔原理〕

本品を、歯科用ハンドピースに装着し回転させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

コンポジットレジン、補綴物等の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用コントラングルハンドピースに装着し試運転する。
- 2) ぶれ等がないことを確認する。
- 3) 酸化アルミナ、ダイヤモンド粒子等の入った研磨用ペーストを塗布し研磨を開始する。  
\* 10,000rpm 以下での使用を推奨。

### 【使用上の注意】

- ・上記使用回転数を厳守すること。
- ・術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

### 【取り扱い上の注意】

- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌可（121℃推奨）

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：COSMEDENT Inc., (U. S. A.)